

Manual de Instruções para Cadeiras Higiênicas com Rodas

Modelos: 6052175, 6052176, 6052177 e 6052178.

A cadeira higiênica com rodas é indicada para pessoas idosas, convalescentes, deficientes e com dificuldade de mobilidade.

- Assento, braços e encosto são acolchoados para maior conforto.
- Estrutura em alumínio com pintura eletrostática que garante durabilidade e fácil manutenção.
- Os braços de descanso e os suportes para os pés são articulados para facilitar a transferência.
- Coletor com tampa.
- Modelos com rodas traseiras maiores possuem freio de mão.
- Modelos com rodas menores possuem freios nas rodas traseiras.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 - A cadeira é fornecida com a estrutura e rodas montadas. Os apoios para os pés e encosto com os braços são fornecidos separados.



2 - Encaixe o encosto nos tubos laterais da estrutura, deslizando-o até que encoste na base e aperte os parafusos para fixá-lo.



3 - Encaixe o suporte de apoio para os pés, posicionando o pino diretamente no tubo da estrutura.

- Pressione a alavanca de travamento para liberar o suporte e volte para a posição frontal.
- Para ajustar a altura do suporte de apoio para os pés, remova o parafuso com a chave sextavada fornecida, ajuste a posição desejada e aperte o parafuso.



4 - Os braços de descanso podem ser levantados para facilitar a transferência lateral.



WOG

WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Auriverde, 1841- Vila Independência
CEP 04222-002 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533
e-mail: wog@wog.com.br - site: www.wog.com.br



Cadeira Montada

Garantia WOG: 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação.

Não se aplicará nos casos de uso indevido, montagem inadequada e aos componentes de desgaste naturais.