



Informações Técnicas

- Assento moldado em poliuretano e acolchoado para maior conforto.
- Estrutura em alumínio com pintura eletrostática
- Braços de descanso e pedais articulados para facilitar transferência
- Distância entre braços 46,5CM
- Coletor com tampa
- 2 Rodízios Frontais Livres e 2 traseiros com travas.
- Medidas do assento: 46CM X 46CM
- Altura máxima: 97CM
- Largura máxima: 56CM
- Profundidade máxima: 86CM
- Peso Máximo: 120Kg

Medidas (mm)



Assento em Poliuretano (PU) da Cadeira Higiênica com rodas

Poliuretano (PU) é um polímero que forma um material sólido com textura muito similar à espuma. Ele é usado em muitos produtos do dia a dia, pois o material possui excelentes características, como flexibilidade, leveza, resistência à abrasão (riscos) e possibilidade de formatos diferenciados.

Características sobre o Poliuretano:

1. PU tem muitos furos pequenos para respirar.
2. Devido a pequenos orifícios na superfície, o PU não impede a absorção de água. Após testes feitos, se deixar o PU na água por mais de 8 horas, ele absorverá 17% de água.

Manter a cadeira constantemente no banheiro não é recomendado.

Após o uso da cadeira de banho no chuveiro, sugerimos o seguinte:

1. Secagem naturalmente ao ar livre
2. Exposição ao sol
3. Uso de aparelhos para secar o assento (temperatura máxima 50°C)

O tempo que você precisa esperar depende do grau de absorção de água. Não pode ultrapassar 50°C, porque pode causar rachaduras e danificar o PU facilmente.

Como limpar o PU:

Limpe apenas com água e sabão (preferencialmente sabão de coco) em temperatura ambiente, ou detergente líquido diluído (10: 1).

1. Não use solventes orgânicos (conteúdo alcoólico) para limpá-lo, pode causar danos à superfície e descoloração.
2. Como há poros na superfície do PU, por favor, não mergulhe o PU na água, apenas lavar a superfície à temperatura ambiente (abaixo de 45°C) com detergente, pois pode secar mais rápido e naturalmente.
3. Você pode usar alvejante, mas por favor, dilua o alvejante (10: 1) e sempre certifique se a composição de todos os seus ingredientes não possuem álcool e que não sejam solventes orgânicos.
4. O Poliuretano é um material que sofre desgaste natural com o uso. É recomendável que o assento seja substituído quando necessário.



Manual de Instruções para Cadeiras Higiênicas com Rodas Modelos: 6052175, 6052176, 6052177 e 6052178.

A cadeira higiênica com rodas é indicada para pessoas idosas, convalescentes, deficientes e com dificuldade de mobilidade.

- Assento, braços e encosto são acolchoados para maior conforto.
- Estrutura em alumínio com pintura eletrostática que garante durabilidade e fácil manutenção.
- Os braços de descanso e os suportes para os pés são articulados para facilitar a transferência.
- Coletor com tampa.
- Modelos com rodas traseiras maiores possuem freio de mão.
- Modelos com rodas menores possuem freios nas rodas traseiras.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 - A cadeira é fornecida com a estrutura e rodas montadas. Os apoios para os pés e encosto com os braços são fornecidos separados.



2 - Encaixe o encosto nos tubos laterais da estrutura, deslizando-o até que encoste na base e aperte os parafusos para fixá-lo.



3 - Encaixe o suporte de apoio para os pés, posicionando o pino diretamente no tubo da estrutura.

- Pressione a alavanca de travamento para liberar o suporte e volte para a posição frontal.
- Para ajustar a altura do suporte de apoio para os pés, remova o parafuso com a chave sextavada fornecida, ajuste a posição desejada e aperte o parafuso.



4 - Os braços de descanso podem ser levantados para facilitar a transferência lateral.



Cadeira Montada